



1 MONTH

NL Gebruiksaanwijzing

Zachte contactlenzen voor maandelijkse vervanging

D Gebrauchsanweisung

Weiche Kontaktlinsen für den monatlichen Austausch

F Mode d'emploi

Lentilles de contact souples pour remplacement mensuel

GB Instruction for use

Soft contact lenses to be replaced monthly



GEBRUIKSAANWIJZING UNICARE 1 MONTH

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR HET GEBRUIK

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door en bewaar hem tijdens het gebruik van de lenzen. De contactlenzen zijn bedoeld voor een gebruik gedurende 1 maand en dienen daarna te worden vervangen. Houdt u strikt aan dit schema. Indien de voorgeschreven vervangingstermijn van 1 maand wordt overschreden, kan dit nadelige gevolgen hebben. Let op: de UV-bescherming van de contactlenzen vervangt niet de bescherming door een zonnebril.

De zachte Unicare® maandlenzen zijn uitsluitend bedoeld voor personen die al sinds langere tijd zonder problemen zachte contactlenzen dragen.

De dunne soepele Unicare® contactlenzen zijn bijzonder flexibel en in principe geschikt voor elk oog. Bij twijfels raadpleeg uw oogarts contactlensspecialist.

De Unicare® maandlenzen zijn zoals bijna alle zachte contactlenzen niet geschikt om tijdens het slapen te dragen. Vóór het slapen gaan de lenzen uitnemen.

Niet gebruiken wanneer de verpakking is geopend.

BELANGRIJK

- Gebruik voor uw lenzen en uw contactlenshouder nooit ongeschikte vloeistoffen zoals kraanwater, bronwater, speeksel en oplossingen voor andere types contactlenzen, maar gebruik uitsluitend een speciale onderhoudsvloeistof voor zachte contactlenzen, zoals b.v. Unicare®.
- Als u de lenzen niet draagt, bewaar deze in een bewaarvloeistof, b.v. in de Unicare® Alles-in-Een-vloeistof voor zachte contactlenzen. Deze vloeistof reinigt en desinfecteert de lenzen. De lenzen dienen dagelijks te worden gedesinfecteerd. Lees de gebruiksaanwijzing op het flesje.
- Zorg ervoor dat uw contactlenshouder goed schoon is. De houder dient regelmatig te worden gedesinfecteerd en eventueel te worden vervangen.
- Raak uw contactlenzen alleen met gewassen, goed afgespoelde en met een stofvrije handdoek afgedroogde handen aan. Daardoor voorkomt u dat de lenzen worden verontreinigd. De lenzen nooit met scherpe voorwerpen, b.v. een pincet, oppakken. Ook lange of scherpe nagels kunnen het zachte materiaal van de lenzen beschadigen. Wees daarom voorzichtig!
- Bewaar de contactlenzen en de verzorgingsproducten buiten het bereik van kinderen.
- Draag uw lenzen niet in een omgeving met giftige of irriterende dampen.
- Draag bij watersport altijd een zwembril.
- Vóór het douchen de lenzen uitnemen.

AANWIJZINGEN VOOR HET INZETTEN VAN ZACHTE CONTACTLENZEN

- Controleer of de sluiting onbeschadigd is. Bij beschadigde sluiting mag de lens in geen enkel geval worden gebruikt. Stuur de beschadigde lens in de originele verpakking naar het volgende adres:


Melleson Pharma, Minervum 7384, NL-4817 ZH Breda, Netherlands

- De contactlenzen zijn steriel in een blisterverpakking verpakt. Trek de folie eraf en haal de lenzen voorzichtig uit de vloeistof. Leg de lens op het puntje van de wijsvinger. Controleer of de contactlens niet binnenstebuiten is gekeerd (zie afb. 1).
- Leg een kleine spiegel op de tafel en buig het hoofd iets naar voren. Trek met de middelvinger van dezelfde hand het onderooglid omlaag, open de ogen zo ver mogelijk en trek het bovenooglid met de wijsvinger van de andere hand omhoog (zie afb. 3).
- Plaats de contactlens langzaam op het oog, laat de oogleden langzaam los en knipper een paar keer met het oog. Door het knippen gaat de lens optimaal op het oog zitten. Herhaal deze stappen voor de andere lens.

MOGELIJKE TOEPASSINGSFOUTEN MET CONTACTLENZEN


- Als u wazig ziet, controleer of u de rechter met de linker lens heeft verwisseld.
- Bij irritaties verwijdert u de contactlens, en controleert u of de lens niet binnenstebuiten gekeerd (afb. 1) of vuil is (b.v. door een wimper, stofdeeltjes).

Afb. 1

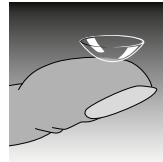

Goed

Afb. 2

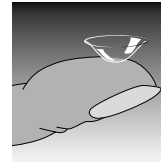

Fout

Afb. 3



Inzetten

Afb. 4



Uitnemen

- Indien het geïrriteerde gevoel blijft, verwijder de contactlenzen en raadpleeg uw oogarts of contactlensspecialist.
- Plaats nooit een droge lens in het oog.

AANWIJZINGEN VOOR HET UITNEMEN VAN ZACHTE CONTACTLENZEN

Open de ogen zo ver mogelijk. Trek het onderooglid met de middelvinger omlaag. Kijk naar boven en schuif de contactlens iets naar beneden. Zodra de lens onder op het witte gedeelte van het oog ligt, kunt u de lens met duim en wijsvinger voorzichtig uitnemen (zie afb. 4).

VERZORGING VAN ZACHTE CONTACTLENZEN

Een goede hygiëne is de basisvoorwaarde om van alle voordelen van uw nieuwe Unicare® maandlenzen te kunnen genieten. Door de dagelijkse verzorging van uw lenzen vermindert u het risico van infecties en oogziekten. Daarom adviseren wij de Unicare® Alles-in-Een-vloeistof voor zachte contactlenzen. Neem altijd de gebruiksaanwijzing op de contactlensvloeistof in acht. Indien u de contactlenzen slechts af en toe draagt, verdient het aanbeveling de bewaarvloeistof iedere 24 uur te verversen.

TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN COSMETICA

- Zet uw contactlenzen altijd in voordat u make-up gebruikt.
- Neem de lenzen uit voordat u de make-up verwijdert.
- Als de lens toch in aanraking is gekomen met make-up, reinig de lens met contactlensvloeistof.
- Knijp de ogen bij het gebruik van haarspray goed dicht.
- Oogschaduw in crèmevorm voorkomt dat poederdeeltjes in aanraking komen met uw contactlenzen en dat er irritaties ontstaan.
- Kayalpotlood nooit aan de binnenste rand van het ooglid aanbrengen.
- Let op bij agressieve stoffen zoals alcohol, aceton, nagellak en parfum.

LAAT UW OGEN MINIMAAL 1x PER JAAR DOOR UW OOGARTS OF CONTACTLENSPECIALIST CONTROLEREN

Volg de aanwijzingen van uw oogarts of contactlensspecialist nauwkeurig op om ongewenste oogproblemen te voorkomen.

TOEPASSING

Ter correctie van gezichtsstoornissen.

WANNEER MOET U UNICARE® MAANDLENZEN NIET GEBRUIKEN?

Bij ontstekingen en infecties van het oog, veranderde sensibiliteit van het hoornvlies, verminderde traanproductie. Bij algemene ziekten op grond van een verminderde weerstand en bij afwijkingen van het ooglid raadpleeg uw oogarts.

BIJWERKINGEN

Neem bij achteruitgang van het zicht, bij brandende of rode ogen, wazig zicht, overmatige traanproductie, droge ogen en lichtgevoeligheid of bij allergische reacties de lenzen uit en raadpleeg uw arts of contactlensspecialist.

WISSELWERKINGEN MET ANDERE MEDICIJNEN

Sommige over een langere periode voorgeschreven medicijnen kunnen de samenstelling van de traanvloeistof veranderen en ervoor zorgen dat u de contactlenzen minder goed verdraagt. Informeer uw arts over welke medicijnen u gebruikt en sinds wanneer. Bij oogdruppels dient u de informatie op de bijsluiter van de middelen in acht te nemen.

Datum van het opstellen van de bijsluiter: 01/2023



BC 8.6 DIA 14.2

SINGLE PATIENT USE